
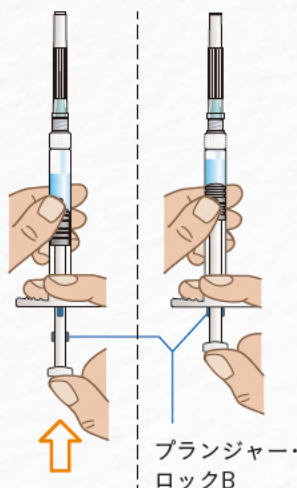
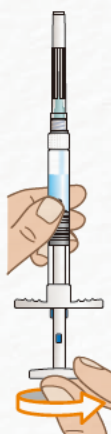


10) 空気(気泡)を先端部に移動させます。

- ① 注射針を上に向けた状態で、注射器の胴体を指先で軽くたたき、気泡を注射器の先端に移動させます。
- ② 片手で注射器を持ったまま、プランジャーを図の矢印の方向に90度回転させます。
- ③ プランジャーをプランジャー・ロックBで止まるまで押し込みます。

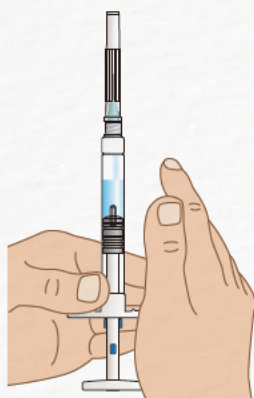


● 針先から薬液が漏れる可能性がありますので、注射器は上向きに持ってください。

- プランジャーを引かないでください。
- 押し込んだ後に注射器内に少量の空気が残りますが、問題ありません。
- プランジャーを押し込んだときに、針先から薬液が漏れたり、プランジャー側に残った溶解液が手元に流れることがありますが、問題ありません。


11

注射の前に、ロックを解除します。

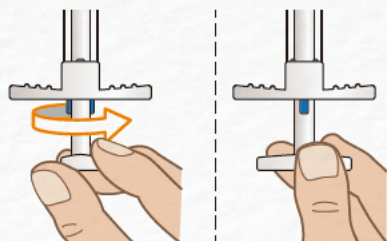

- ① 注射針を上に向けた状態で、プランジャーを図の矢印の方向に90度回転させてください。
 こうすることで薬液を注射可能な状態となります。

- ② 注射針を上に向けたまま、もう一度注射器の胴体を軽くたたき、気泡を注射器の先端に移動させます。
 プランジャーをゆっくりと押し上げ、針先から薬液がわずかに出始めたら、そこで押し上げるのをやめてください。

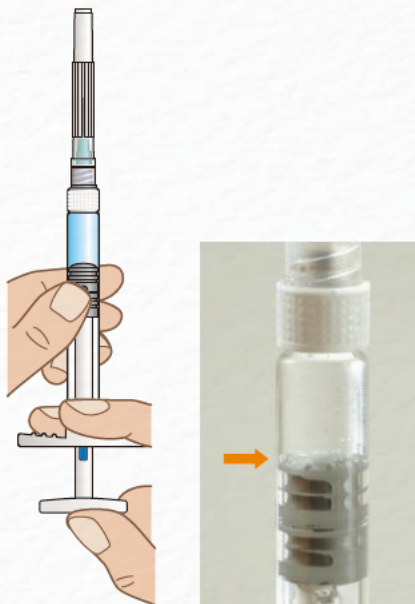

● 図に示す程度の小さな気泡が残っていても、注射には問題ありません。