



補助具

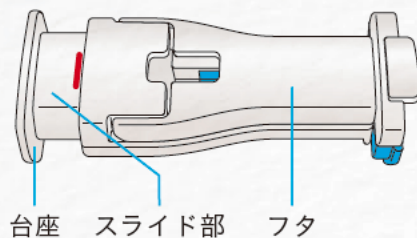


補助具あり

12 補助具に注射器をセットします。

① 補助具のフタを開けます。

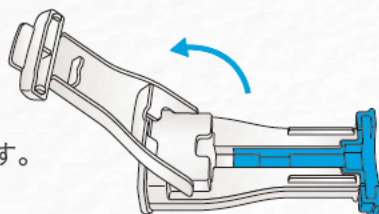



② 注射器を補助具に斜め上から差し込み、注射器をセットします。

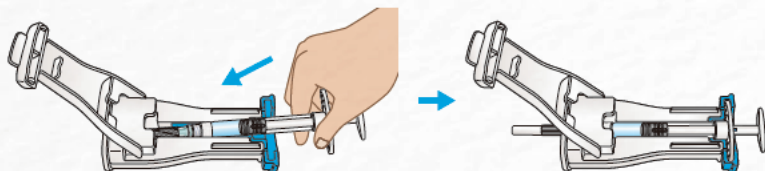

● 注射針のキャップは外さないでください。

③ 補助具のフタを閉じます。 ④ 補助具のスライド

部を引き出し、赤い印が見える状態にします。

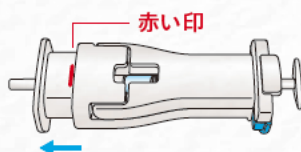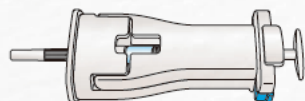

補助具あり

13 注射する部位を消毒します。




注射する部位をアルコール綿でふき、10秒ほど自然乾燥でよく乾かします。

- 消毒した部位に触れたり、息を吹きかけたりしないでください。

補助具あり

14 薬液を注入します。


- ① 注射針のキャップをまっすぐ取り外します。

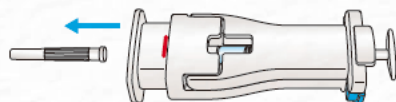

- ② 赤い印が出ていることを確認してください。




- ③ 補助具を皮膚に押し付け、極力動かさないように固定します。固定できたら、スライド部が隠れるまで補助具を垂直に下げて注射針を刺します。

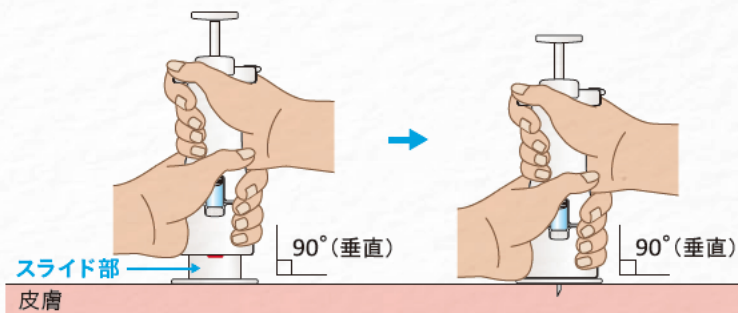


- 補助具は垂直に押し当ててください。
- 皮膚に注射した後は、注射針を抜かないようにしっかり固定してください。

- ④ 補助具のグリップを握りながら、プランジャーを一定の力でゆっくり押し、薬液を注入します。

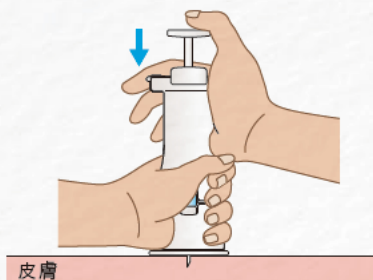

- ⑤ プランジャーを最後まで押し切ったことを確認し、注射針を垂直に抜きます。

- 注射部位はもまないでください。
- 出血した場合は、新しいアルコール綿で10秒程度軽く押さえてください。

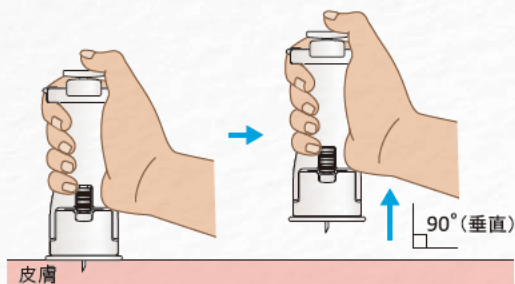


補助具あり


15 注射器を取り外します。

- ① スライド部を赤い印が見えるまで引き出します。

- 注射針に触れないようにご注意ください。

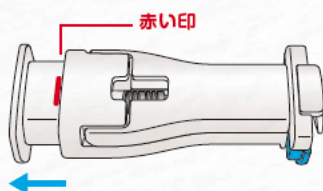

- ② 補助具のフタを開けます。

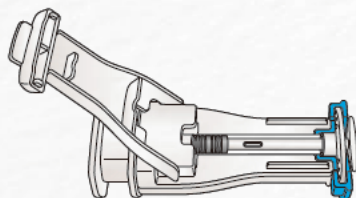

- ③ 注射器を斜め上に引き出します。

